

产品说明书

一次性使用无菌采样拭子

产品货号：H9021

产品规格：1 支

储存条件

室温保存，有效期见外包装

产品介绍

采样拭子可以很容易将脱落细胞提取出来，并可以完整、快速将脱落细胞脱离释放到细胞保存液中。

使用方法

以取口腔上皮细胞为例

1. 手握手柄处轻轻将取样拭子插入口腔。

2. 轻轻旋转取样拭子 3-5 圈，然后慢慢取出。

3. 将取好样的拭子放入样本采集管中，折断手柄，随即密封，完成取样。

注意事项

1. 本产品为一次性使用产品，请勿多次使用。
2. 本产品为灭菌产品，若包装破损，请停止使用。
3. 请根据所属地区法例进行弃置处理。

